


إرشادات تتعلق بالفحص الذاتي لفيروس كورونا

طريقة الاستعمال

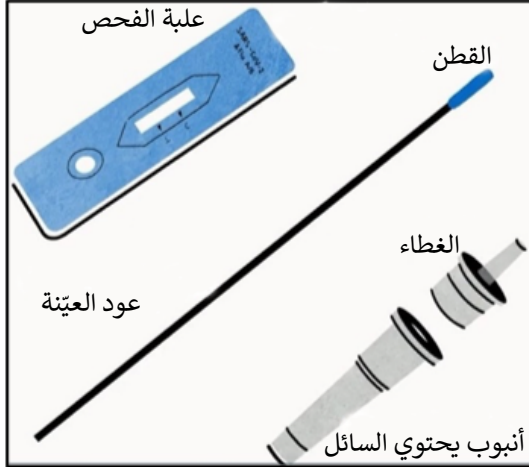

من المهم أن تتبع طريقة الاستعمال بدقة، لكي تحصل على النتيجة الصحيحة للفحص. اقرأ طريقة الاستعمال كاملة قبل البدء.

1- المعدات التي حصلت عليها يجب أن تبقى بمستوى حرارة الغرفة مدة 15 دقيقة قبل الاستعمال.

2- اغسل يديك بعناية قبل البدء.

3- ضع المعدات على سطح جاف ونظيف وسوي، كالطاولة أو المقعد مثلاً.

4- افتح الغلاف المحكم وأخرج علبة الفحص وعبوة مادة التجفيف التي بداخلها. لا تلمس الحقل المستدير أو المربع في العلبة. تأكد من عدم تلف العلبة وضعها على سطح جاف ونظيف وسوي.



علبة الفحص



عبوة تحتوي مادة مجففة

مرفق عبوة تحتوي مادة التجفيف. ينبغي أن تكون الكرات في عبوة مادة التجفيف، صفراء. إن كان لون الكرات في هذه العبوة أخضراً، فلا يصح أن تستعمل هذا الفحص. وعندها يجب أن تحصل على فحص جديد.

5- انزع ورق الألمنيوم الذي يغطي رأس الأنبوب واجعل الأنبوب مستقيماً، كأن تضعه في كوب مثلاً. احرص على ألا يتسرب السائل.

أنبوب يحتوي السائل




6- افتح عبوة عود العينة المعقم. لا تلمس القطن على رأس العود.

7- يجب أن تأخذ عينة من كلا فتحتي الأنف، وابدأ بفتحة الأنف الأقرب. ينبغي أن تستعمل عود العينة في كلا فتحتي الأنف.




8- انظر إلى الأعلى قليلاً وأدخل العود، مستقيماً، إلى الأنف بهدوء حوالي 2 سم. حرّك الفرشاة 4 مرات دائرياً في الأنف، لحوالي 15 ثانية، قبل سحبها بهدوء. كرر ذلك في فتحة الأنف المقابلة.

من المهم القيام بذلك كما هو موضح هنا، لكي تكون نتيجة العينة صحيحة.

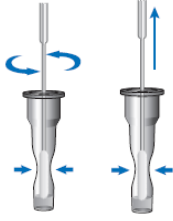

9- أنزل، بالشكل المستقيم، فرشاة أخذ العينة في الأنبوب الذي يحتوي السائل، واغمر موضع القطن الذي وضعته في الأنف، في السائل. اضغط على الجزء السفلي من الأنبوب أثناء تدوير فرشاة العينة 10 مرات على الأقل. اعصر السائل من قطعة القطن من خلال الضغط على الأنبوب، أثناء دوران الفرشاة في الوقت ذاته وسحبها للأعلى وإخراجها. ارم الفرشاة في كيس القمامة.

10- اضغط الغطاء مع عداد القطرات، إلى داخل الأنبوب بقوة وإحكام.

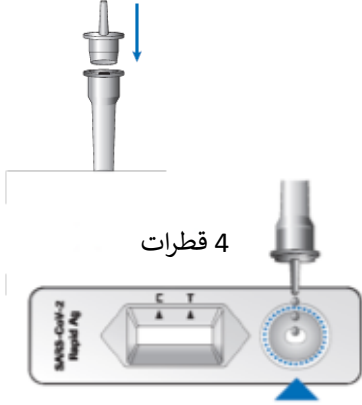

11- اقلب الأنبوب البلاستيكي، واقطر 4 قطرات من سائل الأنبوب البلاستيكي في الحقل الدائري من علبة الفحص.


12- يجب الآن أن تبقى علبة الفحص ساكنة لمدة 15 دقيقة. قم بتوقيت 15 قبل قراءة النتيجة في العينة.

13- اجمع كل المعدات المستعملة في كيس القمامة بعد قراءة علبة الفحص. اربط الكيس بإحكام وارمه في كيس القمامة العادي.

14- اغسل يديك والسطح الذي استعملته.

اقرأ نتيجة العينة

تظهر النتيجة كخطوط ملونة في الحقل المربع من علبة الفحص. احرص على وجود إضاءة جيدة عند قراءة النتيجة.

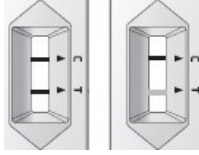

الفحص الإيجابي


إذا اكتشف الفحص فيروس كورونا، فسيظهر خطان ملونان. لون في منطقة التحكم (سي C) وخط في منطقة الفحص (تي T). جميع أطراف اللون التي تصبح ظاهرة في منطقة الفحص، يجب تقييمها كفحص إيجابي.

إذا حصلت على فحص إيجابي، فمن المرجح أن يكون لديك كورونا. يجب عليك أن تدخل في عزلة وتحجز موعداً لدى محطة الفحص لتأكيد الفحص. حين تحجز موعداً، يجب أن تبلغهم أن لديك فحص إيجابي بناء على الفحص السريع.



الفحص السلبي

إذا ظهر خط ملون واحد فقط في منطقة التحكم (سي C)، فإن الفحص سلبي ولم يوجد فيروس كورونا. فأنت لست مصاباً بالعدوى، لكن لا يزال عليك اتباع الأحكام المتعلقة بكورونا.

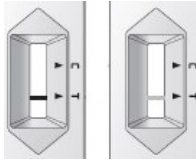

الفحص غير الصالح

إن لم يظهر خط ملون في منطقة التحكم (سي C)، فهناك خطأ ما في الفحص. يجب عليك إجراء فحص جديد بعلبة فحص جديدة.